

# Bula Ilustrativa Action



Ler atentamente todo o manual antes de realizar o teste.

## Materiais Fornecidos



## Procedimento do Teste

**PASSO 1-** Abrir a embalagem de alumínio.



**PASSO 2-** Limpar o dedo com álcool.




**PASSO 3-** Girar para destravar e, em seguida, retirar a tampa protetora da ponta da lanceta.



**PASSO 4-** Pressionar a ponta destravada da lanceta contra o dedo. Em seguida, apertar o dedo até fazer uma gota de sangue.




**PASSO 5-** Pressionar o tubo e, em seguida, encostar a sua extremidade marcada, na gota de sangue. Reduzir a pressão no tubo até aspirar o sangue atingindo a marca azul.

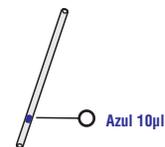


Utilizar APENAS a marcação azul para a realização do teste Action.


**PASSO 6-** Despejar o sangue contido no tubo capilar no poço de amostra (S) do dispositivo de teste. Para isso, basta alinhar o tubo contendo o sangue com o poço e pressionar o corpo do tubo capilar para esvaziar todo o sangue contido nele.

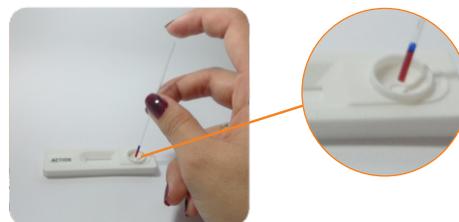

**PASSO 7-** Pingar três gotas do frasco de plástico.

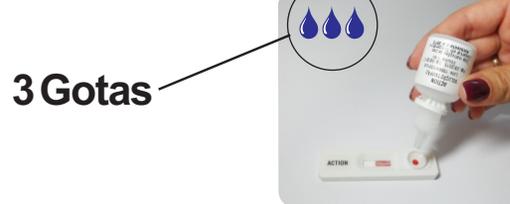

**PASSO 8-** Aguarde pelo menos 10 a 20 minutos para ler o resultado.

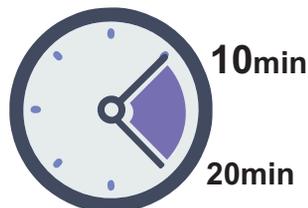

ATENÇÃO

NÃO LER O RESULTADO APÓS OS 20 MINUTOS.

