


Bula Ilustrativa Action



Ler atentamente todo o manual antes de realizar o teste.

Materiais Fornecidos

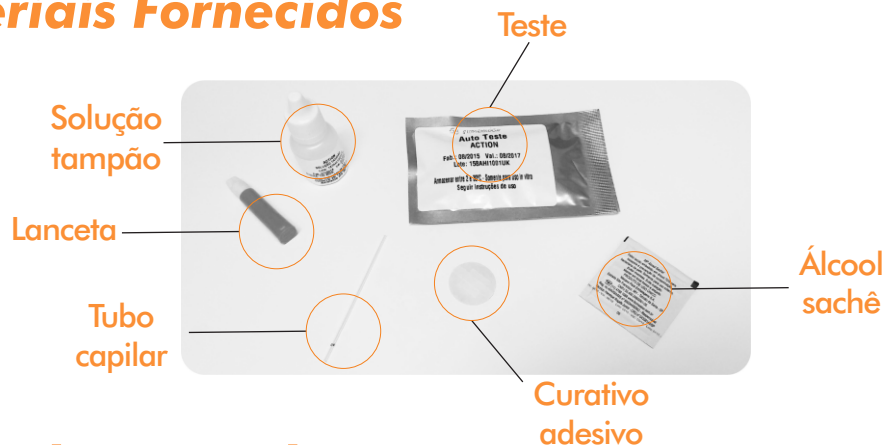


Procedimento do Teste

PASSO 1- Abrir a embalagem de alumínio.




PASSO 2- Limpar o dedo com álcool.

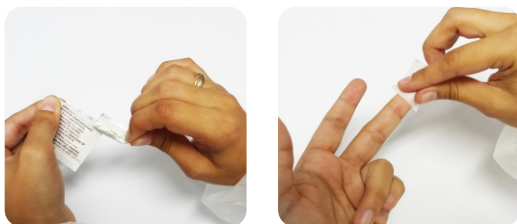



PASSO 3- Girar para destravar e, em seguida, retirar a tampa protetora da ponta da lanceta.



PASSO 4- Pressionar a ponta destravada da lanceta contra o dedo. Em seguida, apertar o dedo até fazer uma gota de sangue.

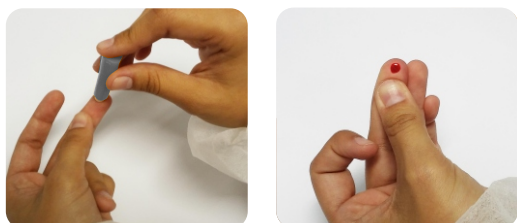


PASSO 5- Pressionar o tubo e, em seguida, encostar a sua extremidade marcada, na gota de sangue. Reduzir a pressão no tubo até aspirar o sangue atingindo a marca azul.

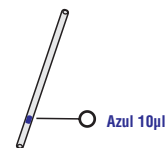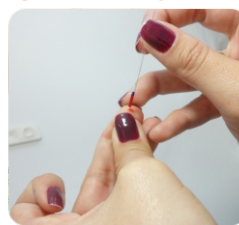


Utilizar APENAS a marcação azul para a realização do teste Action.


PASSO 6- Despejar o sangue contido no tubo capilar no poço de amostra (S) do dispositivo de teste. Para isso, basta alinhar o tubo contendo o sangue com o poço e pressionar o corpo do tubo capilar para esvaziar todo o sangue contido nele.

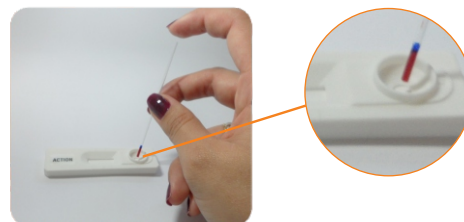

PASSO 7- Pingar três gotas do frasco de plástico.

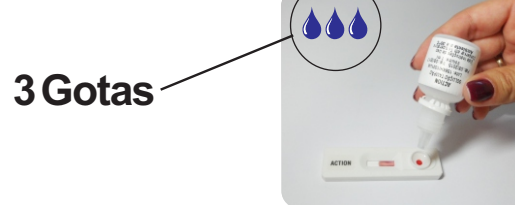

PASSO 8- O resultado deve ser interpretado após os 10 primeiros minutos e até no máximo 20 minutos.

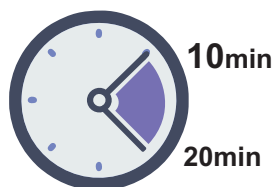


ATENÇÃO


NÃO LER O RESULTADO APÓS OS 20 MINUTOS.

Interpretação do resultado


Positivo

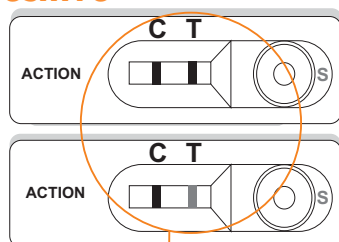


Obs: Qualquer intensidade da linha é considerado positivo.

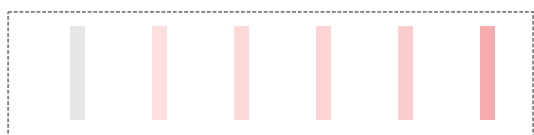

Negativo

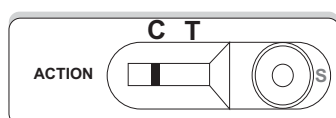

Inválido

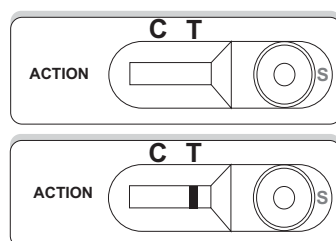

Descarte

DESCARTAR O TESTE REALIZADO APÓS OS 20 MINUTOS



Lixo Comum



Atenção

Não utilizar esse produto se a embalagem estiver violada. Comunicar imediatamente o fabricante e não realizar o teste.

Autoteste sem fins diagnósticos, apenas para triagem. Para obter um resultado confirmatório, favor procurar uma unidade de saúde. Leia o manual de instruções.

Fabricado por:

ORANGELIFE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
Estrada dos Bandeirantes, 11.742, Parte - Vargem Pequena
CEP: 22783-111 Rio de Janeiro - RJ/Brasil
www.orangelife.com.br
Uso exclusivo para diagnóstico "in vitro"
Reg. Anvisa: 80535240050
Resp. Técnico: Larissa Lima CRF-RJ 24322
CONSERVAR A TEMPERATURA 2°C A 30°C.
última revisão: 1904V08

Sac Orangelife: 0800-887-1589
24 horas/Todos os dias Gratuito
Ministério da Saúde Disque Saúde: 136

